

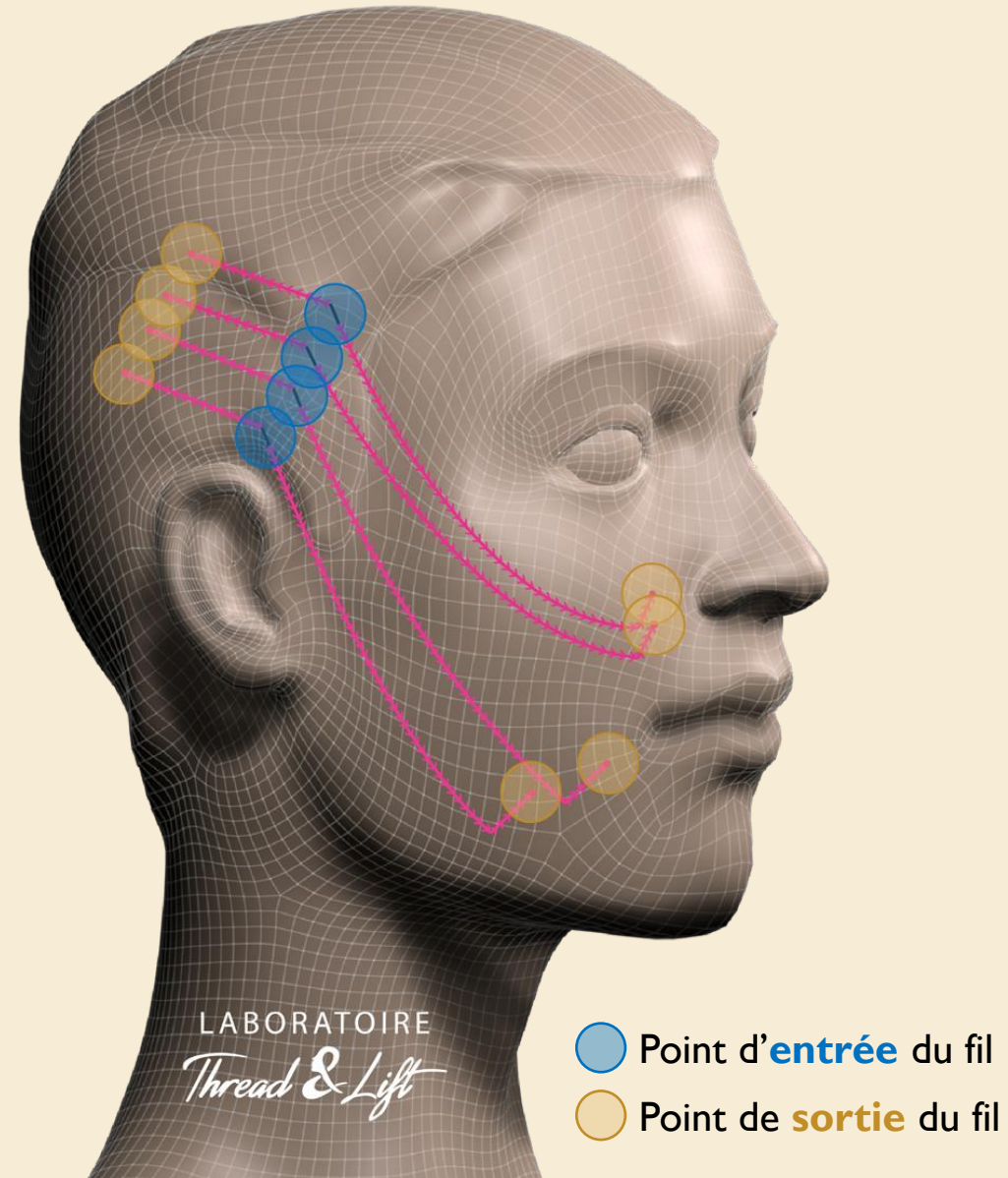


## La technique en " V Profond "


1. **Forme en V** - de la partie inférieure des trajets pour verrouiller les fils.
2. **Points d'entrée au-dessus de la ligne des cheveux** - pour un meilleur soutien et un effet sur le tiers supérieur.
3. **Trajets supérieurs à ~45 degrés** - pour bloquer les fils.
4. **Implantation profonde** - dans le SMAS au-delà du bord inférieur du zygoma - permet d'exploiter pleinement le potentiel des fils tout en évitant le risque de formation de fronces.

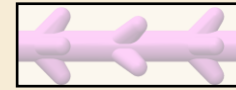


# INFINITE-THREAD® PLANS D'IMPLANTATION

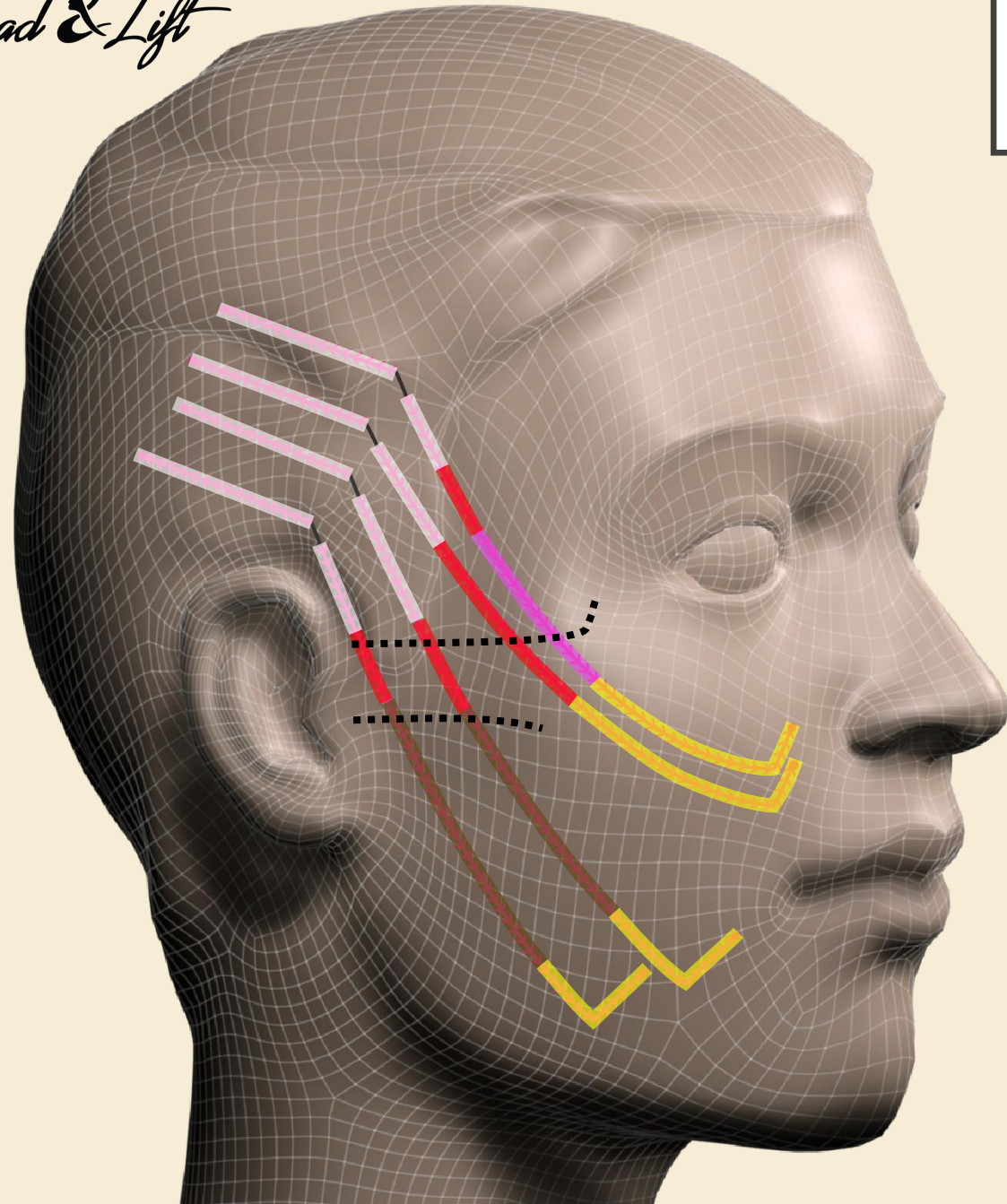


sous la peau / scalp

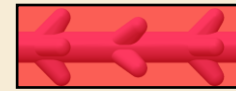


sous le fascia

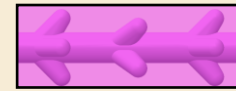

sous le muscle orbiculaire

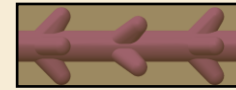

dans le SMAS

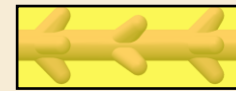

dans la graisse sous-cutanée



bord supérieur & inférieur de l'arcade  
zygomatique